

| Simbologia | Descrição | Simbologia | Descrição |
|---|--------------------------------------|---|--|
|  | Código do produto |  | Não reutilizar |
|  | Número do lote |  | Consulte as instruções de uso |
|  | Fabricante |  | Não utilizar se a embalagem estiver danificada |
|  | Data de fabricação |  | Conservar seco |
|  | Prazo de validade |  | Manter afastado da luz solar |
|  | Representante na Comunidade Européia | Rx only | Notificação exigida pelo FDA para comercialização nos Estados Unidos |
| PROIBIDO REPROCESSAR | Proibido Reprocessar | | |



DSP INDUSTRIAL EIRELI EPP

RUA MARECHAL FLORIANO PEIXOTO, 303 – OURO VERDE II

CAMPO LARGO – PARANÁ – BRASIL – 83.606-290

RESPONSÁVEL TÉCNICO: CELIO NETZEL – CREA/PR 25412/D

0800 600 88 66

www.dsbiomedical.com.br

USO PROFISSIONAL

Leia com atenção todas as informações desta instrução de uso antes de aplicar o produto.

Apresentação

Estão disponíveis com as seguintes apresentações:

- . Quadradas (135mm x 135mm) ou
- . Redonda (ø 135mm)

Em caixas com 2, 6 ou 10 unidades.

Descrição/ Indicação de uso

São placas para moldeiras no formato quadrado ou redondo indicadas para a confecção de moldeiras para clareamento dental, placas de proteção esportiva entre outras utilizando o processo de vacuum forming.

Composição Básica

Copolímero de Etileno e Acetato de Vinila (EVA).

Modo de Usar

- 1º Passo: Moldar a arcada do paciente.
- 2º Passo: Preencher o molde com gesso, obtendo o modelo.
- 3º Passo: Acomodar a placa de EVA na plastificadora a vácuo.
- 4º Passo: Posicionar o modelo de gesso centralizado sob a placa e ligar a plastificadora para iniciar o aquecimento da placa.
- 5º Passo: Quando a placa apresentar um abaulamento evidenciando seu amolecimento, abaixá-la rapidamente sobre o modelo e ligar o vácuo entre 10 e 15 segundos.
- 6º Passo: A placa se ajustará aos contornos do modelo.
- 7º Passo: Após o resfriamento da moldeira, recorte o excesso de material.

Precauções Contraindicações

Durante o processo de moldagem das placas podem apresentar-se quentes e provocar queimaduras na pele se tocadas. Evite tocar nas placas durante ou logo após o processo. Não utilizar o produto caso a embalagem esteja violada. Não expor o produto ao calor excessivo.

Armazenamento

Mantém o produto em sua embalagem sempre fechada. Proteger da incidência da luz solar direta. Armazene o produto em temperaturas de 0°C a 30°C

Advertência

Nunca utilize o produto se estiver com o prazo de validade expirado. Mantenha fora do alcance das crianças. Somente para uso odontológico. Antes de utilizar observe o aspecto do produto, caso observe alguma anomalia, entre em contato imediatamente com o fabricante ou com um profissional. O fabricante não é responsável por danos causados por outros usos ou por manipulação incorreta. Este material foi fabricado somente para uso dental e deve ser manipulado de acordo com as instruções de uso. É de responsabilidade do usuário a comprovar, antes do emprego deste produto, se este material é compatível e adequado com a utilização desejada, principalmente quando esta utilização não está indicada nestas instruções de uso. Descrições de dados não constituem nenhum tipo de garantia e, por isto, não possuem qualquer vinculação. Não reutilizar a embalagem vazia. Para realizar o descarte do produto siga a legislação local.