

## INSTRUÇÕES DE USO DO KIT GUIA CIRÚRGICO

Este dispositivo é indicado para procedimentos especializados, que devem ser realizados por profissionais qualificados em Implantodontia. Para melhores resultados, utilize o produto com técnicas adequadas. Aplique o produto sempre em condições adequadas, em ambiente cirúrgico.

## INDICAÇÕES DE USO

O Kit Guia Cirúrgico foi desenvolvido para identificar o local correto para a inserção de implantes dentários entre os espaços biológicos peri-implantares, entre os dentes e os implantes. Além de orientar a localização correta do implante, auxilia na determinação do diâmetro ideal do implante durante a colocação.

Os instrumentos do Kit de Guia Cirúrgica são reutilizáveis, feitos de aço inoxidável e fornecidos não estéreis. São embalados em estojo autoclavável. Os guias cirúrgicos também podem ser vendidos individualmente, para reposição, em blisters selados a quente.



Descrição	Código
GUIA DE ARCO (PARA EDÊNTULOS)	25.7000
GUIA CIRÚRGICO Ø3,3/3,5 X 1 X 6,7	26.3306
GUIA CIRÚRGICO Ø3,3/3,5 X 1 X 7,3	26.3307
GUIA CIRÚRGICO Ø3,3/3,5 X 1 X 9,3	26.3309
GUIA CIRÚRGICO Ø3,3/3,5 X 2 X 12,0	26.3312
GUIA CIRÚRGICO Ø3,3/3,5 X 2 X 13,6	26.3313
GUIA CIRÚRGICO Ø3,3/3,5 X 2 X 15,6	26.3315
GUIA CIRÚRGICO Ø5,0 X 1 X 12,0	26.5012
GUIA CIRÚRGICO Ø5,0 X 2 X 17,0	26.5017
GUIA CIRÚRGICO Ø5,0 X 2 X 19,0	26.5019
ESTOJO AUTOCLAVÁVEL	26.1000/1
GUIA CIRÚRGICO Ø3,8/4,0 X 1 X 8,0	26.3808
GUIA CIRÚRGICO Ø3,8/4,0 X 1 X 10,0	26.3810
GUIA CIRÚRGICO Ø3,8/4,0 X 2 X 15,0	26.3815
GUIA CIRÚRGICO Ø3,8/4,0 X 2 X 17,0	26.3817
GUIA CIRÚRGICO Ø4,3/4,5 X 1 X 8,0	26.4308

GUIA CIRÚRGICO Ø4,3/4,5 X 1 X 10,0	26.4310
GUIA CIRÚRGICO Ø4,3/4,5 X 2 X 18,0	26.4318
GUIA CIRÚRGICO Ø5,0 X 1 X 9,0	26.5009
CABO DE GUIA CIRÚRGICO	26.3350
PINO PARALELO GRADUADO Ø2.0/3.0	28.4042

## APLICAÇÃO

Os guias cirúrgicos permitem posicionar e determinar o espaçamento para a colocação dos implantes com diâmetros 3,3/3,5 - 3,8/4,0 e 5,0. Cada guia cirúrgico pode ser usado para a colocação de um único implante ou 2 implantes adjacentes. Possuem asas laterais para guiar a osteotomia do implante com base na cervical dos implantes adjacentes dentes. O kit contém uma chave para segurar o guia cirúrgico durante o procedimento, permitindo o uso em todas as áreas do arco. Os guias cirúrgicos foram projetados para serem colocados de 2 a 3 mm de um dente natural e o espaçamento entre os dispositivos eram de 3 mm.

É composto por:

- Estojo autoclavável: utilizado para armazenamento e esterilização segura dos instrumentais do Kit Guia Cirúrgico.
- Guia Cirúrgico: Também chamado de bandeira, é um guia de posicionamento cuja função básica é determinar com precisão o espaçamento e a posição apropriados para a inserção de um ou dois implantes adjacentes.
- Alça do guia cirúrgico: tem como função segurar o guia cirúrgico, auxiliando na manobra e posicionamento do paciente guia intraoralmente durante o procedimento.
- Guia para pacientes desdentados: É utilizado em maxilares desdentados para orientação tridimensional e visual do paciente, ângulo (mesial/distal) do implante e paralelismo oral para colocação do implante.

Paralelizador 2/3 : Usado para garantir a colocação paralela dos implantes e verificar o posicionamento ou determinar o ângulo para escolher um componente protético.

## PERCEBER

A falha em reconhecer os comprimentos reais das brocas em relação às medições radiográficas pode resultar em danos aos nervos e outras estruturas vitais. Perfurar além da profundidade pretendida para cirurgia do maxilar inferior pode resultar em dormência permanente no lábio inferior e no queixo ou levar a sangramento na parte inferior da boca. Como seguir os procedimentos obrigatórios para qualquer cirurgia, tais como: assepsia durante a perfuração óssea, evitar danos aos vasos sanguíneos e nervos, usando conhecimento anatômico e radiografias pré-operatórias.

## **CONTRAINDICAÇÕES**

Este produto não possui contraindicações, desde que utilizado corretamente para os fins indicados.

## **RISCOS E BENEFÍCIOS**

Como qualquer cirurgia, não pode ser garantida cem por cento, pois alcançar um bom desempenho envolve diversos fatores, incluindo a usabilidade, as condições clínicas do paciente e o próprio produto. A não observância as limitações de uso e etapas de trabalho indicadas podem resultar em falha.

A falha em reconhecer os comprimentos reais das brocas em relação às medições radiográficas pode resultar em danos aos nervos e outras estruturas vitais. Perfurar além da profundidade pretendida para cirurgia do maxilar inferior pode resultar em dormência permanente no lábio inferior e no queixo ou levar a sangramento na parte inferior da boca.

## **AVISOS E PRECAUÇÕES**

- O planejamento inadequado pode comprometer o desempenho do conjunto implante/prótese, resultando em falhas no sistema, como perda ou fratura do implante, soltura ou fratura de componentes e/ou parafusos protéticos.
- Devido à sua função, o comprimento da perfuração deve ser no máximo 0,5 mm maior que a profundidade de inserção do implante. Este comprimento adicional deve ser considerado durante a fase de planejamento.
- As brocas não devem ser reafiadas.
- A não substituição das brocas conforme recomendação do fabricante pode causar aquecimento ósseo indevido, comprometendo o sucesso do procedimento.
- Deve-se ter cuidado em casos de pacientes que apresentem sinais de alergia ou hipersensibilidade aos componentes químicos do material: aço inoxidável cirúrgico.
- Certifique-se de utilizar a broca compatível com a sequência de brocas indicada de acordo com as dimensões e interface protética do implante planejado.
- As Brocas DSP Biomedical são compatíveis somente para preparo prévio à instalação dos implantes DSP Biomedical.
- Este produto deve ser utilizado estéril.
- Para realizar o procedimento, certifique-se de que o paciente tenha espaço interoclusal suficiente para manusear os instrumentais na região desejada.
- Não interrompa a rotação do motor com a broca dentro da cavidade cirúrgica, pois isso pode dificultar a

remoção ou causar fratura da broca.

- Não utilize o produto se a embalagem estiver danificada.
- Não utilize o produto se a validade estiver vencida.
- Antes de cada procedimento, verifique o perfeito encaixe entre as peças.
- Certifique-se de que as peças não sejam engolidas ou aspiradas pelo paciente.
- Certifique-se de possuir todos os instrumentais necessários para a realização do procedimento conforme o planejamento cirúrgico.
- Antes de cada procedimento, verifique as condições dos instrumentais, respeitando sempre a vida útil deles. Substitua os instrumentais em caso de danos, marcações desbotadas, afiação comprometida, deformações ou desgastes.
- Utilize sempre a sequência de produtos DSP Biomedical. A utilização de instrumentais e/ou componentes protéticos de outros fabricantes não garante o perfeito funcionamento do Sistema de Implantes DSP Biomedical e isenta qualquer garantia do produto.
- É de responsabilidade do dentista utilizar os produtos DSP Biomedical de acordo com as instruções de uso.

### **IMPORTÂNCIA DA NECESSIDADE DE ADESÃO A UM REGIME DE CUIDADOS**

Os produtos devem ser protegidos contra aspiração quando manuseados intraoralmente. Aspirar produtos pode levar a infecções ou lesões físicas não planejadas. Se você quiser protegê-lo, use dique de borracha. Se um implante ou instrumento for engolido ou aspirado, chame um médico imediatamente. Além das precauções obrigatórias para qualquer cirurgia, como assepsia, durante a perfuração no osso maxilar, danos aos nervos e vasos devem ser evitados consultando o conhecimento anatômico e imagens médicas pré-operatórias (por exemplo, raios-X). A falha em reconhecer a duração real das brocas em relação às medições radiográficas pode resultar em danos permanentes aos nervos e outras estruturas vitais. Perfurar além da profundidade pretendida para cirurgia do maxilar inferior pode resultar em dormência permanente no lábio inferior e no queixo ou levar a hemorragia no assoalho da boca. O uso inadequado de produtos leva a um trabalho mal executado e aumento do risco. Em particular, os usuários de ferramentas manuais devem ter o cuidado de usá-las com cuidado e consideração. O usuário deve sempre evitar tocar em instrumentos e peças sem proteção (luvas e aventais de proteção estéreis devem ser usados). Danos ósseos térmicos causados por instrumentos rotativos e oscilantes devem ser sempre evitados (treinamento do usuário, trabalho em baixa velocidade e com resfriamento suficiente (consulte a seção "Resfriamento"). Durante a aplicação intraoral, deve-se atentar para a proteção dos produtos contra sucção ou queda no chão. Os instrumentos rotativos precisam ser fixados o máximo possível com a velocidade definida antes de aplicá-los ao objeto. Os

instrumentos rotativos são usados com os instrumentos rotativos. Podem ocorrer fraturas ósseas ou fraturas de componentes do sistema. As brocas são fornecidas em condições não estéreis e devem ser reprocessadas e esterilizadas antes do primeiro uso no paciente. Imediatamente após cada uso, todos os produtos devem ser desinfetados e esterilizados. A limpeza e a esterilização inadequadas dos instrumentos podem resultar em infecção do paciente por bactérias nocivas. Para evitar danos aos instrumentos, eles devem ser removidos individualmente da embalagem blister. A blister de transporte não se destina a ser usada como recipiente para esterilização a vapor de brocas. Elas devem ser desembaladas antes do primeiro reprocessamento. É essencial utilizar apenas turbinas, bem como peças manuais e angulares que estejam técnica e higienicamente em perfeitas condições, mantidas e limpo. Não utilize o dispositivo se a embalagem primária tiver sido danificada ou aberta anteriormente. Não utilize instrumentos danificados ou rombudos para perfuração. As bordas cortantes dos instrumentos quebradas causam vibrações e grandes forças de pressão, que por sua vez levam à quebra das bordas da preparação e superfícies ásperas. Instrumentos tortos e/ou que não funcionam corretamente devem ser descartados imediatamente. Dispositivos danificados, corroídos ou desgastados não devem entrar em contato com instrumentos intactos para evitar corrosão por contato.

## **INSTRUÇÕES DE OPERAÇÃO**

Guia Cirúrgico entre os dentes:

1. Escolha o tamanho do Guia Cirúrgico e adapte o cabo a ele.
2. Aproxime o Guia Cirúrgico da área desdentada, seguindo a trava de segurança.
3. Verifique se há um bom ajuste. Caso contrário, selecione outra aba. A adaptação adequada será alcançada quando as extensões laterais tocarem as superfícies vestibulares dos dentes adjacentes.
4. O diâmetro do implante é decidido e o posicionamento perfeito é alcançado. 5. Usando a broca lança 2.0, comece a perfurar o orifício do guia cirúrgico.
6. Remova o guia cirúrgico após a marcação do osso.
7. Continue a perfuração com a sequência de brocas para o diâmetro e a altura do implante escolhidos. 8. Insira o paralelizador na perfuração para confirmar o posicionamento dos implantes.
9. Insira o implante de acordo com o procedimento específico para inserção de implantes. Guia Cirúrgica para pacientes desdentados: Adapte a guia à curvatura da arcada dentária. Fixe a guia com um pino central, perfurando na região da linha média com uma broca piloto de  $\varnothing$  2,2 mm e profundidade de 10 mm. Perfure os locais dos implantes de acordo com o protocolo cirúrgico. Cada broca é alinhada paralelamente à superfície do molde e no ângulo de perfuração.

## **LIMPEZA E DESINFECÇÃO MANUAL SANEAMENTO**

Este produto deve ser devidamente higienizado após cada uso. Proceda da seguinte forma:

1. Desmonte os instrumentos (quando aplicável).
2. Mergulhe os instrumentos por pelo menos 1 minuto no detergente enzimático (CIDEZYME<sup>®</sup>, 1,6% v/v) para que os instrumentos fiquem suficientemente cobertos. Tome cuidado para que não haja contato entre os instrumentos.
3. Use cuidadosamente uma escova macia para auxiliar no processo de limpeza. Agite os instrumentos várias vezes durante a limpeza.
4. Mergulhe os instrumentos por 15 minutos na solução de limpeza (CIDEZYME<sup>®</sup>, 1,6% v/v) sob tratamento ultrassônico, para que os instrumentos fiquem suficientemente cobertos. Tome cuidado para que não haja contato entre os instrumentos.
5. Retire os instrumentos da solução de limpeza e lave-os bem por pelo menos 3 vezes (por pelo menos 1 minuto) em água corrente.

## **DESINFECÇÃO**

1. Mergulhe os instrumentos (desmontados, se aplicável) por 10 minutos na solução desinfetante (CIDEX<sup>®</sup> OPA - Solução OPA - não diluída) de modo que os instrumentos fiquem suficientemente cobertos.
2. Retire os instrumentos da solução desinfetante e lave-os de acordo com as instruções abaixo:

## **INSTRUÇÕES DE LAVAGEM**

1. Após remover os instrumentos da Solução CIDEX<sup>®</sup> OPA - Solução OPA, lave bem o dispositivo médico, mergulhando-o completamente em água em abundância. Utilize água .
2. Mantenha o dispositivo totalmente imerso por pelo menos 1 minuto.
3. Remova o dispositivo e descarte a água da lavagem.
4. Sempre use novos volumes de água para cada lavagem.
5. Repita o procedimento mais 2 vezes, para um total de 3 LAVAGENS, com grandes volumes de água limpa para remover resíduos da SOLUÇÃO CIDEX<sup>®</sup> OPA - OPA (Resíduos podem causar efeitos colaterais graves)
6. Inspecione e embale os instrumentos imediatamente após a remoção.

## **LIMPEZA E DESINFECÇÃO AUTOMÁTICA**

1. Use detergente Neodisher<sup>®</sup> MediZym .
2. Desmonte os instrumentos, se necessário;
3. Transfira os instrumentos para a Lavadora Desinfetante (tenha cuidado para que os instrumentos não entrem em contato);

4. Inicie o programa;
5. Remova os instrumentos da Lavadora Desinfetante após o término do programa;
6. Verifique e embale os instrumentos imediatamente após a remoção.

## ESTERILIZAÇÃO

Este produto é reutilizável, fornecido sem esterilização e embalado individualmente. Este produto deve ser devidamente higienizado e esterilizado antes do uso. Esterilize-o no dia anterior ou no dia do procedimento.

ATENÇÃO: Estes produtos não devem ser autoclavados em suas embalagens originais. Para esterilização, utilize somente o método de esterilização a vapor, de acordo com os parâmetros abaixo:

	Fractional vacuum/Dynamic air removal <sup>1</sup>	Gravitational <sup>2</sup>
Sterilization time	4 minutes	15 minutes
Sterilization temperature <sup>3</sup>	134°C / 273°F	134°C / 273°F
Drying time	Pelo menos 20 minutos <sup>3</sup>	Pelo menos 20 minutos <sup>3</sup>

1. Pelo menos três etapas de vácuo.
2. O procedimento de esterilização gravitacional, menos eficaz, não deve ser utilizado se o procedimento de vácuo fracionado estiver disponível.
3. Temperatura máxima de esterilização: 134 °C (273 °F). A eficácia necessária no tempo de secagem depende diretamente dos parâmetros sob responsabilidade do usuário (configuração e densidade de carga, condições de esterilização, que devem ser determinados pelo usuário. No entanto, o tempo de secagem aplicado não deve ser inferior a 20 minutos).

### OBSERVAÇÕES:

1. Após a esterilização, embale os instrumentos em um ambiente seco e livre de poeira.
2. O procedimento de esterilização imediata/flash não deve ser usado.
3. Não use esterilização térmica a seco, esterilização por radiação, esterilização por formaldeído e óxido de etileno, bem como esterilização por plasma.

## PRECAUÇÕES

O Kit de Instrumentos Cirúrgicos é fornecido em embalagem não estéril. Cabe à equipe esterilizar o produto antes do uso, seguindo os protocolos clássicos de autoclave e biossegurança.

## EFEITOS ADVERSOS

Não são esperados efeitos adversos, desde que o produto seja usado de acordo com as instruções de uso.

## INFORMAÇÕES ADICIONAIS PARA O PROFISSIONAL

Oriente o paciente sobre a necessidade de acompanhamento médico profissional após a cirurgia e siga as instruções sobre precauções, higiene e prescrição de medicamentos. Essas orientações são de responsabilidade do profissional responsável.

## CONDIÇÕES DE ARMAZENAMENTO

Este produto deve ser armazenado em sua embalagem original, em local limpo e seco, com temperatura máxima de 45°C e protegido da luz solar direta.

## DESCARTE DE MATERIAL

Quaisquer produtos e consumíveis utilizados durante a cirurgia de instalação de implantes dentários podem comprometer a saúde de quem os manuseia após o uso. Antes de descartá-los no meio ambiente, recomenda-se observar e cumprir a legislação vigente.

## GARANTIA

A DSP Biomedical garante ao proprietário deste produto uma garantia contra qualquer defeito de material ou de fabricação. A presença de qualquer defeito deve ser comunicada imediatamente ao fabricante, respeitando o prazo legal. A garantia dos produtos fabricados pela DSP Biomedical está vinculada à estrita observância das informações descritas nas instruções de uso. O uso inadequado do produto, em desacordo com as instruções, isenta o fabricante e/ou distribuidor de qualquer responsabilidade. Observação: a garantia não cobre desgaste do produto.


## INFORMAÇÕES DE SUPORTE

Caso haja necessidade de maiores informações, ou caso o produto apresente algum efeito adverso, com potencial risco ao paciente, que gere ou tenha potencial de causar lesão ou ameaça à saúde pública, ou ainda qualquer insatisfação do cliente, deverá entrar em contato com a DSP pelo telefone 0800 600 88 66 ou enviar e-mail para [sac@dspbiomedical.com.br](mailto:sac@dspbiomedical.com.br).

## VALIDADE

8 anos em embalagem lacrada sem uso

## SÍMBOLOS

SIMBOLOGIA	DESCRIÇÃO	SIMBOLOGIA	DESCRIÇÃO
	Número do lote		Veja as instruções de uso
	Data de fabricação		Atenção
	Fabricação		Manter seco
	Não estéril		Manter ausente de luz solar
	Produto Código		Data de Validade
	Temperatura limite		Identificador exclusivo do dispositivo
	Umidade limite		Não utilize se a embalagem estiver danificada e consulte as instruções de uso
	européu Representante		País de fabricante
	Número do modelo		Dispositivo médico
	Frágil , manuseável com cuidado		Importador

	Marca CE		Marcação CE com número do organismo notificado; SIQ, número 1304
	Não reutilize		Notificação de prescrição obrigatória pela FDA para o mercado dos Estados Unidos

**FABRICADO POR**

DSP INDUSTRIAL LTDA  
Rua Marechal Floriano Peixoto, 303 – Ouro Verde II  
Campo Largo /PR – Brasil  
CNPJ 03.960.018/0001-23  
Telefone: +55 41 3291-2200  
www.dspbiomedical.com  
Responsável Técnico: CREA- PR 25412/D

**REPRESENTANTE NA COMUNIDADE EUROPEIA**

DSP BIOMÉDICA EUROPA UNIP LDA  
Alameda dos Oceanos, 142 Lt. 4,24 0H  
Parque das Nações – Lisboa - Portugal  
1990-502  
Telefone: (351) 962833592

Registro da ANVISA: 80116980003