



## DSP POLISHING PASTE AL -RESTORATION

FABRICADO E DISTRIBUÍDO POR:

---



DSP Industrial LTDA | CNPJ: 03.960.018/ 0001-23

Rua Marechal Floriano Peixoto, 303 Ouro Verde II - Campo Largo - PR 83.606-290  
- SAC 0800.600.88.66  
Resp. Técnica: Célio G. Netzel  
CREA-PR: 25.412/D  
Registro Anvisa: 80116980027  
PARA COMPRAS, DÚVIDAS, ELOGIOS E RECLAMAÇÕES: 0800 600 8866

## INSTRUÇÕES DE USO | português

NOME COMERCIAL: DSP Polishing Paste Al – Restoration

NOME TÉCNICO: Pastas Para Profilaxia e Polimento Dental

CÓDIGO: 0.4001

Leia atentamente todas as informações destas instruções de uso antes de aplicar o produto.

INTRUÇÕES DE USO

**SOMENTE USO PROFISSIONAL**

Guarde para consulta até o consumo total do produto.

Guarde esta instrução até não haver mais interação do produto com o seu paciente.

### CONTEÚDO:

- 1 seringa com 4,0g DSP Polishing Paste Al – Restoration – 5,5 – 7,5 microns com 1 ponteiros aplicadoras;
- 1 manual de instruções para o profissional.

### DESCRIÇÃO DO PRODUTO:

DSP Polishing Paste Al – Restoration é uma pasta para polimento à base de Óxido de Alumínio de granulação – 5,5 a 7,5 microns, elaborada para o acabamento inicial da superfície. Oferece excelente resultado no acabamento de resinas e outros materiais restauradores. Para uso exclusivo profissional. A pasta de polimento DSP Polishing Paste Al – Restoration combina em sua formulação as propriedades lubrificantes e abrasivos de alta dureza é de granulação extrafina.

A pasta DSP Polishing Paste Al – Restoration é indicada para o acabamento de resinas em geral. Sua formulação foi desenvolvida para uso exclusivo em consultório odontológico e contém um veículo da pasta, composto por ingredientes hidrossolúveis que proporciona facilidade na lubrificação durante o processo de polimento e não sofre com ação do calor. Apresenta viscosidade média que facilita na hora do polimento.

## DSP POLISHING PASTE AL – RESTORATION

### INDICAÇÃO DO PRODUTO:

DSP Polishing Paste Al – Restoration é indicada para ser utilizada em conjunto com discos de feltro ou discos aveludados, o que potencializa sua ação no polimento final de resinas e outros materiais restauradores.

### COMPOSIÇÃO:

Óxido de Alumínio, veículo lubrificante, espessantes e aroma.

### INSTRUÇÕES DE USO:

1º Passo

Prepare a superfície a ser polida utilizando a pasta DSP Polishing Paste Al – Restoration sobre um disco de feltro deixando-a lisa e no formato final desejado. Esta etapa deve ser observada com rigor porque, geralmente, a obtenção de brilho tem forte dependência da condição inicial da superfície.

2º Passo

Encaixar o disco de feltro na extremidade do mandril. Dispensar a pasta sobre o disco, ou diretamente sobre o dente ou material restaurador. Aplicar o produto em rotação baixa, exercendo pouca pressão, com toques intermitentes e em movimentos circulares.

3º Passo

Caso não tenha obtido o resultado desejado, repita o procedimento.

### PRECAUÇÕES E CONTRAINDICAÇÕES:

Utilize rotação baixa, exercendo pouca pressão sobre os discos de feltro, com toques intermitentes e em movimentos circulares. Para evitar o aquecimento excessivo da superfície dental. Durante a aplicação do produto é recomendada a utilização de óculos de segurança pelo profissional. Não utilizar em pacientes com qualquer sensibilidade aos componentes deste produto. Suspender o uso do produto em caso de reações alérgicas.

### CONSERVAÇÃO E ARMAZENAMENTO:

Manter o produto em sua embalagem sempre fechada.

Proteger da incidência da luz solar direta. Armazene o produto em temperaturas de 0°C a 30°C.












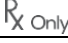

Caso constatem avarias solicite a troca do material.

DATA DE FABRICAÇÃO: VIDE EMBALAGEM

PRAZO DE VALIDADE: 2 ANOS APÓS A DATA DE FABRICAÇÃO.

**ADVERTÊNCIA:**

Respeite o prazo de validade. Nunca utilize o produto se estiver com o prazo de validade expirado. Mantenha fora do alcance das crianças. Somente para uso odontológico. Antes de utilizar observe o aspecto do produto, caso observe alguma anomalia, entre em contato imediatamente com o fabricante ou com um profissional. O fabricante não é responsável por danos causados por outros usos ou por manipulação incorreta. Este material foi fabricado somente para uso dental e deve ser manipulado de acordo com as instruções de uso. É de responsabilidade do usuário a comprovar, antes do emprego deste produto, se este material é compatível e adequado com a utilização desejada, principalmente quando esta utilização não está indicada nestas instruções de uso. Descrições de dados não constituem nenhum tipo de garantia e, por isto, não possuem qualquer vinculação. Não reutilizar a embalagem vazia. Não reutilizar a embalagem vazia para outros fins. Para realizar o descarte do produto siga a legislação local.

	Código do Produto
	Número do lote
	Fabricante
	Data de fabricação
	Representante na comunidade europeia
	Reprocessamento Proibido
	Data de Durabilidade Mínima
	Não reutilize
	Não utilize se a embalagem estiver danificada
	Mantenha seco
	Mantenha longe da luz
	Notificação exigida pela FDA para negócios nos EUA.
	Referência à informação juntada ou anexada