



DSP PORCELAIN ETCH

FABRICADO Y DISTRIBUIDO POR:



DSP Industrial LTDA | CNPJ: 03.960.018/ 0001-23

Rua Marechal Floriano Peixoto, 303 Ouro Verde II - Campo Largo - PR 83.606-290
- SAC 0800.600.88.66
Resp. Técnica: Célio G. Netzel
CREA-PR: 25412/D
Registro de Anvisa: 80116980024
PARA COMPRAS, CONSULTAS, QUEJAS Y RECLAMOS: 0800 600 8866

INSTRUCCIONES DE USO | español

NOMBRE COMERCIAL: DSP Porcelain Etch

NOMBRE TÉCNICO: Acondicionar Ácido

CÓDIGO: 0.1200

Lea con atención toda la información de esta instrucción de uso antes de aplicar el producto.

INSTRUCCIONES DE USO

SOLO USO PROFESIONAL

Guarde para consulta hasta el consumo total del producto. Guarde esta instrucción hasta que no tenga más interacción del producto con su paciente.

CONTENIDO:

- 1 jeringa de acondicionador ácido que contiene 3g con 1 punta aplicadora,
- 1 manual de instrucciones para el profesional y paciente.

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO:

DSP Porcelain Etch es un gel a base de Ácido Fluorhídrico en concentraciones del 5 o 10%, para el grabado ácido de porcelana*, con el objetivo de aumentar la adherencia de los materiales resinosos.

INDICACIÓN DEL PRODUCTO:

Acondicionamiento superficial de porcelanas dentales para adhesión en el proceso de restauración, tales como porcelanas feldespáticas, vidrios cerámicos y fijaciones de brackets de ortodoncia solo en dientes de porcelana.

COMPOSICIÓN:

Ácido Fluorhídrico al 5 o 10%, Colorantes, Espesantes y Agua Desionizada.

INSTRUCCIONES DE USO:

DSP PORCELAIN ETCH

1º Porcelanas Feldespáticas Acondicione durante 1-2 minutos con DSP Porcelain Etch 10% HF;

2ª Cerámica vítrea reforzada con Leucita Acondicione durante 1 minuto con DSP Porcelain Etch 10% HF;

3º Cerámica vítrea a base de Disilicato de Litio Acondicione durante 20-30 segundos con DSP Porcelain Etch 5% HF;

4º Circonio No acondicionable.

PRECAUCIONES Y CONTRAINDICACIONES:

El ácido fluorhídrico es corrosivo. Evitar el contacto con esmalte, dentina, ojos, piel y mucosas. Se recomienda el uso de protección ocular para el paciente, dentista y asistente durante su uso. Cuando se aplica en la boca del paciente, los tejidos bucales deben protegerse con vaselina y, siempre que sea posible, aislarse por completo. En caso de contacto accidental con ojos, piel o mucosas, lavar con abundante agua. Si es necesario, busque asistencia médica.

EFFECTOS COLATERALES:

El contacto con los tejidos blandos y la ingestión del producto provoca irritación e intoxicación por fluoruro. Suspender el uso del producto en caso de reacciones alérgicas.

CONSERVACIÓN Y ALMACENAMIENTO:

- Mantener el producto en su envase siempre cerrado.
- Proteger de la incidencia de la luz solar directa
- Almacene el producto en temperaturas de 0°C a 30°C.
- Si se constatan averías solicite el cambio del material.














FECHA DE FABRICACIÓN: VER EL ENVASE

PLAZO DE VALIDEZ: 2 AÑOS DESPUÉS DE LA FECHA DE FABRICACIÓN.

ADVERTENCIA:

Respete la fecha de validez. No utilice nunca el producto si ha vencido. Mantener fuera del alcance de los niños. Sólo para uso odontológico. Antes de utilizarlo, observe el aspecto del producto; si

observa alguna anomalía, póngase en contacto con el fabricante o con un profesional inmediatamente. El fabricante no se hace responsable de los daños causados por otros usos o por una manipulación inadecuada. Este material ha sido fabricado únicamente para uso dental y debe ser manipulado según las instrucciones de uso. Es responsabilidad del usuario comprobar, antes de utilizar este producto, si el material es compatible y adecuado para el uso previsto, especialmente cuando este uso no está indicado en estas instrucciones de uso. Las descripciones de los datos no constituyen ningún tipo de garantía y, por tanto, no son vinculantes. No reutilizar los envases vacíos. No reutilizar los envases vacíos para otros fines. Para realizar el descarte del producto siga la legislación local.

	Código de Producto
	Número del lote
	Fabricante
	Fecha fabricación
	Representante en la comunidad europeo
	Prohibido reprocesar
	Fecha Durabilidad Mínimo
	No reutilizar
	No utilice si el empaque esta dañado
	Mantener seco
	Mantener alejado de la luz
	Notificación exigido por FDA para Negocio En EUA.
	Referencia a información unirse o adjunto