



## DSP PORCELAIN ETCH

### FABRICADO E DISTRIBUÍDO POR:

---



DSP Industrial LTDA | CNPJ: 03.960.018/ 0001-23

Rua Marechal Floriano Peixoto, 303 Ouro Verde II - Campo Largo - PR 83.606-290  
- SAC 0800.600.88.66  
Resp. Técnica: Célio G. Netzel  
CREA-PR: 25.412/D  
Registro Anvisa: 80116980024  
PARA COMPRAS, DÚVIDAS, ELOGIOS E RECLAMAÇÕES: 0800 600 8866

## INSTRUÇÕES DE USO | português

NOME COMERCIAL: DSP PORCELAIN ETCH

NOME TÉCNICO: Condicionador Ácido

CÓDIGO: 0.1200

Leia atentamente todas as informações destas instruções de uso antes de aplicar o produto.

### INTRUÇÕES DE USO

#### SOMENTE USO PROFISSIONAL

Guarde para consulta até o consumo total do produto. Guarde esta instrução até não haver mais interação do produto com o seu paciente.

#### CONTEÚDO:

- 1 seringa de condicionador ácido contendo 3g com 1 ponteira aplicadora,
- 1 manual de instruções para o profissional.

#### DESCRIÇÃO DO PRODUTO:

DSP Porcelain Etch é um gel à base de Ácido Fluorídrico nas concentrações de 5 ou 10%, para o condicionamento ácido de porcelanas, com o objetivo de aumentar a adesão dos materiais resinosos.

#### INDICAÇÃO DO PRODUTO:

Condicionamento superficial de porcelanas dentais para adesão em processo de restaurações, como porcelanas feldspáticas, vidros ceramizados e fixações de brackets ortodônticos somente em dentes de porcelanas. COMPOSIÇÃO: Ácido Fluorídrico 5 ou 10%, Corante, Espessantes e Água Deionizada.

#### INSTRUÇÕES DE USO:

1º Porcelanas Feldspáticas Faça o condicionamento por 1-2 minutos com DSP Porcelain Etch 10% HF;

## DSP PORCELAIN ETCH

2ª Cerâmica vítrea reforçada com Leucita Faça o condicionamento por 1 minuto com DSP Porcelain Etch 10% HF;

3ª Cerâmica vítrea à base de Dissilicato de Lítio Faça o condicionamento por 20-30 segundos com DSP Porcelain Etch 5% HF;

4ª Zircônia Não condicionável.

#### PRECAUÇÕES E CONTRAINDICAÇÕES:

O Ácido Fluorídrico é corrosivo. Evite contato com esmalte, dentina, olhos, pele e mucosa. É recomendado o uso de proteção ocular para o paciente, dentista e assistente durante sua utilização. Quando aplicado na boca do paciente, os tecidos orais devem ser protegidos com vaselina e, sempre que possível, faça isolamento absoluto. Em caso de contato acidental com olhos, pele ou mucosa, lave abundantemente com água. Se necessário, procure assistência médica.

#### EFEITOS COLATERAIS:

Contato com tecidos moles e ingestão do produto causa irritação e intoxicação por fluoretos. Suspender o uso do produto em caso de reações alérgicas.

#### CONSERVAÇÃO E ARMAZENAMENTO:

Manter o produto em sua embalagem sempre fechada.

Proteger da incidência da luz solar direta.

Armazene o produto em temperaturas de 0°C a 30°C.

Caso constatem avarias solicite a troca do material.














DATA DE FABRICAÇÃO: VIDE EMBALAGEM

PRAZO DE VALIDADE: 2 ANOS APÓS A DATA DE FABRICAÇÃO.

#### ADVERTÊNCIA:

Respeite o prazo de validade. Nunca utilize o produto se estiver com o prazo de validade expirado. Mantenha fora do alcance das crianças. Somente para uso odontológico. Antes de utilizar observe o aspecto do produto, caso observe alguma anomalia, entre em contato imediatamente com o fabricante ou com um profissional. O

fabricante não é responsável por danos causados por outros usos ou por manipulação incorreta. Este material foi fabricado somente para uso dental e deve ser manipulado de acordo com as instruções de uso. É de responsabilidade do usuário a comprovar, antes do emprego deste produto, se este material é compatível e adequado com a utilização desejada, principalmente quando esta utilização não está indicada nestas instruções de uso. Descrições de dados não constituem nenhum tipo de garantia e, por isto, não possuem qualquer vinculação. Não reutilizar a embalagem vazia. Não reutilizar a embalagem vazia para outros fins. Para realizar o descarte do produto siga a legislação local.

	Código do Produto
	Número do lote
	Fabricante
	Data de fabricação
	Representante na comunidade europeia
	Reprocessamento Proibido
	Data de Durabilidade Mínima
	Não reutilize
	Não utilize se a embalagem estiver danificada
	Mantenha seco
	Mantenha longe da luz
	Notificação exigida pela FDA para negócios nos EUA.
	Referência à informação juntada ou anexada